

Tricodur®

TaloBrace

Tricodur®

TaloBrace

Komfort-
Sprunggelenk-
orthese



**LATEX
FREE
FORMULA**

Nicht mit
Naturkautschuklatex
hergestellt

MD Medizinprodukt




.....



 **BSN medical GmbH**
Quickbornstrasse 24,
20253 Hamburg, Germany
www.bsnmedical.com

JBR14933.01 11/2019

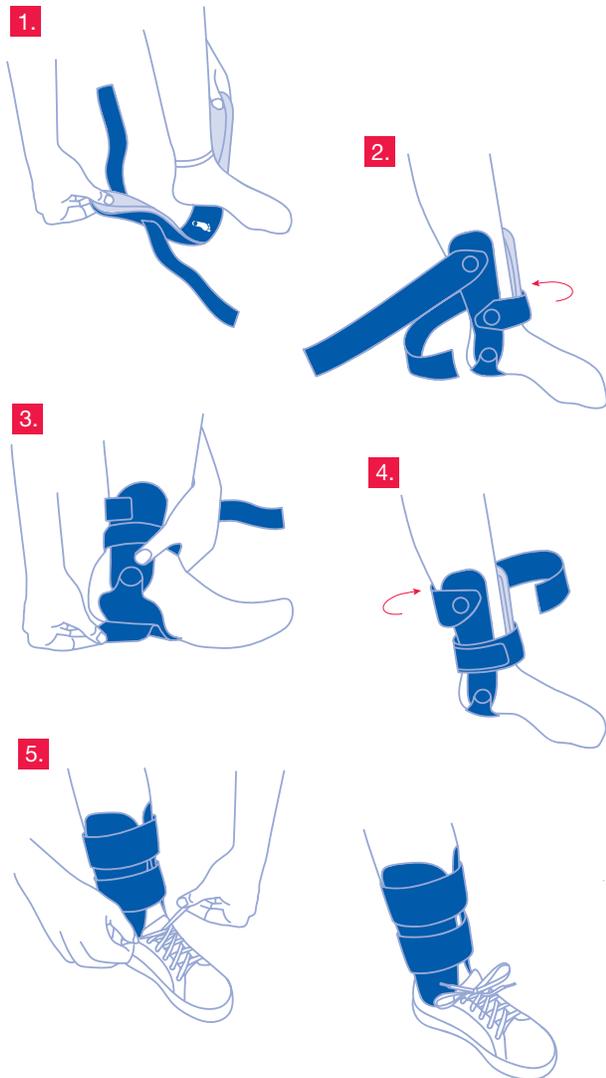

Größe		REF	REF
	S/M Trainer	< 165 cm	71072-02
	L/XL Standard	> 165 cm	71070-02

DE Tricodur® TaloBrace

Liebe Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für Tricodur® TaloBrace entschieden haben.

Tricodur® TaloBrace ist eine funktionelle Sprunggelenkorthese, die das obere Sprunggelenk stabilisiert sowie Inversionen und Eversionen einschränkt. Die anatomisch geformten starren Schalen sorgen für einen sicheren Sitz und eine gute Passform. Außerdem sorgen die integrierte weiche Schaumstoffpolsterung und die speziell entwickelten weichen Kanten für ein angenehmes Gefühl und mindern die Entstehung von Druckstellen. Der Anziehinweis auf dem Fersensteg und die individuell einstellbaren, umlaufenden Klettverschlüsse ermöglichen ein korrektes und einfaches Anlegen. Tricodur® TaloBrace kann aufgrund des schlanken Designs in vielen Schuhen getragen werden.

Bitte befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen. Gute Besserung!

Verwendungszweck:

Die Orthese dient der Stabilisierung des Sprunggelenks.

Die Anwendungsgebiete umfassen:

- Bänder- und Kapselverletzungen des oberen Sprunggelenks (z. B. Bandrupturen, Zerrungen, Distorsionen)
- Leichte Weichteilverletzungen
- Chronische Sprunggelenksinstabilität
- Rehabilitation und Vermeidung von Sprunggelenksverletzungen
- Akute, chronische und entzündliche Ödeme

Wenn Sie unsicher sind, ob das Produkt für Sie geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Gebrauchsanweisung:

Für einen optimalen Tragekomfort empfiehlt es sich, die Orthese über einer Socke zu tragen.

1. Legen Sie den Fuß auf den Fersensteg zwischen den beiden Schalen. Das Logo auf dem Fersensteg bietet eine weitere Orientierungshilfe für die exakte Positionierung des Fußes.
2. Schließen Sie zuerst den unteren Kletttriemen.
3. Sie können über die Breite des Fersenstegs bequem die Position der Schalen optimieren. Hierzu den Fersensteg öffnen und die Breite für optimalen Komfort anpassen.
4. Schließen Sie dann den oberen Kletttriemen. Dieser ist gegenläufig zum unteren Kletttriemen angebracht.
5. Tragen Sie zur optimalen Unterstützung während des normalen Gehens Schuhe.

Tricodur® TaloBrace ist für den Einsatz bei nur einem Patienten vorgesehen.

Reinigung und Pflege:

- a) Die Schalen und Riemen können mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel gesäubert werden.
- b) Die herausnehmbaren Schaumstoffpolster können im Schonwaschgang bei 40 °C/104 °F in der Maschine gewaschen werden.

Vor dem Tragen müssen alle Komponenten vollständig an der Luft getrocknet werden.

Anmerkung:

Melden Sie alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle der BSN medical GmbH und Ihrer lokalen zuständigen Behörde.