

Bacoban^{DL}

STOP
bis zu **10**
Tage

Bakterien
Pilze
bestimmte
Viren

wasserbasiert (alkoholfrei)
gebrauchsfertige Lösung

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von medizinischem Inventar und anderen Flächen

(gemäß Richtlinie 93/42/EWG; MDD)



Produkt-Typ

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion, lanzeitig antimikrobieller Effekt. Formaldehydfrei, phenolfrei

Anwendungsgebiet

Desinfektion und Reinigung von medizinischen Flächen gemäß Richtlinie 93/42/EWG (Medizinprodukte) und Oberflächen aller Art in Kliniken, Arztpraxen, Rehabilitationseinheiten und Altenheimen.

Insbesondere in Bereichen, in denen eine effiziente und lang anhaltende Hygiene gefordert wird.

Besonders geeignet für Bereiche, in denen durch Mikroorganismen unangenehme Gerüche entstehen, wie Toilette und sanitäre Einrichtungen. Bacoban[®] DL kann in kritischen und sensiblen Bereichen der Pharma- und Kosmetikindustrie eingesetzt werden.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Bacoban[®] DL wirkt gegen: Bakterien, Pilze, Virus (Hepatitis B und C Viren, Influenzavirus einschließlich H5N1 und H1N1, Rotavirus und Adenovirus).

Lieferformen / Verpackungseinheiten

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Art. Nr.
500ml Flasche	12 Flaschen/Karton	BACDL500
Tücher (50 St.)	16 wiederverschließbare Packungen/Karton	BACTUE

Produktkenndaten:

100 g Lösung enthalten: Benzalkoniumchlorid 0,26 g, Natriumpyrithion 0,025 g, Polykondensate, Duftstoffe, gereinigtes Wasser,

Bacoban^{DL}

wasserbasiert (alkoholfrei)
gebrauchsfertige Lösung

Mikrobiologische Wirksamkeit

DIN EN 1040	5 min.
DIN EN 1275	5 min.
DIN EN 1276	5 min.
DIN EN 1650	5 min.
DIN EN 13697	5 min.

Antimikrobieller Effekt bis zu 10 Tage geprüft in Anlehnung an ASTM E 2180

Bacoban[®] DL wirkt gegen: Bakterien, Pilze, Virus (Hepatitis B und C Viren, Influenzavirus einschließlich H5N1 und H1N1, Rotavirus und Adenovirus)

Anwendungshinweis

Gebrauchsfertige Lösung.

Zur Gewährleistung einer guten desinfizierenden Leistung auf gute Benetzung achten. Auf die Oberfläche Bacoban[®] DL aufbringen, mit einem Tuch gleichmäßig verteilen und trocknen lassen.

Nicht mit anderen Reinigern oder anderen Zusätzen mischen. Beim Einsatz von zu hoch konzentrierter Lösung kann nach dem Abtrocknen ein sichtbarer Film entstehen. Dieser kann leicht durch saure oder alkalische Reiniger entfernt werden.

Kann auf allen Oberflächen verwendet werden. Bei empfindlichen Oberflächen empfehlen wir eine Beständigkeitsprüfung mit Bacoban[®] DL an einer unauffälligen Fläche.

Aufbewahrung nur im geschlossenen Gefäß. Nur im vollständig entleeren. Zustand kann das Behältnis dem Recycling zugeführt werden. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Unter Beachtung der örtlichen und behördlichen Vorschriften einer geeigneten Entsorgung zuführen.

Sicherheitshinweis:

Während der Desinfektion für ausreichende Belüftung sorgen. Von Zündquellen fernhalten. Die Berufsgenossenschaft schreibt bei Umgang mit Flächendesinfektionsmitteln das Tragen von Handschuhen vor. Nicht verschlucken oder einatmen. Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen oder Schleimhäuten gründlich mit Wasser spülen und Arzt kontaktieren. Von Kindern fernhalten.

Wichtig!

Die langanhaltende antimikrobielle Wirkung von Bacoban[®] DL darf nicht dazu führen, notwendige Desinfektionsmaßnahmen bei sichtbaren und/oder fraglichen Kontaminationen zu unterlassen.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

UBA-Nr.: 5704 0031

Biozid-Reg. Nr.: N-34071

